

Vizsgálat megnevezése	Minta típusa	Mintavevő eszköz neve	Mintavevő kupak színe	Tárolási hőmérsékletek - MAXIMUM idők			Minta fogadási időablak	Preanalitikai, mintakezelési leírás	
				Primer minta					
				teljes vér, szájnyálkahártya törtet, ujjbegy vérminta					
				15-25 °C	2-8 °C	-20 °C			
Rákszűrés									
ColonAIQ - multigén DNS metilációs teszt kolorektális rák rizikóbecsléséhez	Teljes vér	Cell free DNA stabilizáló cső (CW BIO) 10 ml	homokszín kupak, üveg cső	4 nap			H-Cs: 9:00 - 16:00 P: 9:00-15:00	Cell free DNA stabilizáló csőbe levett minta szükséges, ezért a vérévteli csöveket teljesen meg kell tölteni! Nem teljesen megtöltött csőből a vizsgálat nem végezhető el! A csövet rögtön a vérévtel után 8-10x a hossztenyel mentén óvatosan szükséges teljesen megforgatni a kellő keveredés biztosítása érdekében. A vérévteli csövet TILOS centrifugálni! A vérmintákat a rázkódástól és erős fénytől védeni kell! A mintának 96 órá belül szobahőmérsékleten szállítva a laboratóriumba kell érkeznie! Mintavétel és laborba küldés kizárólag hétfőtől péntekig lehetséges! A hétvégi mintavétel ebbe a csőbe a 96 órás szállítás miatt lehetséges!	A minta a nap folyamán bármikor levehető, étrendi előírás nincs. Javasolt a vérévtel előtti napon, majd a vérévtel napján is a pácienseknek figyelni a megfelelő folyadékbevitelre. A vizsgálat előtti hétben a páciens nem kaphat vérátömlesztést. Várandósság ideje alatt, illetve az azt követő két hónapban nem végezhető el a vizsgálat! A vizsgálatkéréshez csatolni kell az olvashatóan kitöltött és aláírással ellátott páciens belegevőző nyilatkozatot. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Teljes vér	Cell free DNA stabilizáló cső (STRECK) 10 ml	barna fekete terepmintás kupak, üveg cső	4 nap					
	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 9 ml	lila	6 óra	24 óra		H-P: 9:00-15:00	Minimum 8 ml EDTA (K2/K3) csőbe levett minta szükséges, ezért a vérévteli csöveket teljesen meg kell tölteni! Nem teljesen megtöltött csőből a vizsgálat nem végezhető el! A csövet rögtön a vérévtel után 8-10x a hossztenyel mentén óvatosan szükséges teljesen megforgatni a kellő keveredés biztosítása érdekében. A vérévteli csövet TILOS centrifugálni! A vérmintákat a rázkódástól és erős fénytől védeni kell! A mintának 24 órá belül 4 fokoz szállítva a laboratóriumba kell érkeznie! Mintavétel és laborba küldés kizárólag hétfőtől péntekig lehetséges!	
Rákhajlam									
Örökletes NGS (újgenerációs szekvenálás) alapú vizsgálatok genetikai tanácsadással	Szájnyálkahártya törtet	oracollect-DNA (DNA Genotek mintavevő)	kék kupakos, stabilizáló folyadékot tartalmazó mintagyűjtő	5 nap			H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai belegevőző nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágó gumizni! A mintavevővel a fognyit 10 alkalommal kell megdörzsölni, a fogak dörzsölésének elkerülésével. A mintavétel után a lezárt csövet 15x meg kell forgatni. Mintavétel után legfeljebb 5 nappal a laboratóriumba kell juttatni, szobahőmérsékleten kell tárolni. Terhes, illetve szoptató nők esetében nem végezhető el a vizsgálat! A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!	
Szív- és érrendszer, trombozís genetikai hajlam									
V. faktor (Leiden) mutáció vizsgálata	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vésképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap	H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!	
	Szájnyálkahártya törtet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai belegevőző nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágó gumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatkéréshez két Swab levétele szükséges!	
II. faktor (G20210A) vizsgálata	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vésképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!	
	Szájnyálkahártya törtet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai belegevőző nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágó gumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatkéréshez két Swab levétele szükséges!	
Metiléntetrahydrofolát-reduktáz génpolimorfizmus vizsgálata (MTHFR C677T)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vésképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!	
	Szájnyálkahártya törtet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai belegevőző nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágó gumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatkéréshez két Swab levétele szükséges!	
Metiléntetrahydrofolát-reduktáz génpolimorfizmus vizsgálata (MTHFR	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vésképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg belegevőző nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírással ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!	

A1298C)	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap		H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Plazminogén aktivátor inhibitor génpolimorfizmus vizsgálata (PAI-I)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Angiotenzin konvertáló enzim génpolimorfizmus vizsgálata (ACE)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
ApoB (ApoB-100 R3500Q) polimorfizmusok	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
ApoE (ApoE C112R és R158C) polimorfizmusok	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap		Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!	
Anyagcsere, nutrigenetika								
Laktózintolerancia vizsgálat (MCM6 C13910T)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap	H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Laktózintolerancia extra vizsgálat (MCM6 C13910T és G22018A)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Fruktózintolerancia vizsgálat (ALDOB)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Cöliákia vizsgálat (HLA)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumban kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Vasfelfelvétési zavar (hemokromatózis) vizsgálat (HFE)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumban kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!

	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap		H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Koffeinlebotás genetikai vizsgálata (CYP1A2)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Gilbert-kór, bilirubin-lebomlási zavar genetikai vizsgálata (UGT1A1 5-8TA)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Családtervezés, infertilitás								
Y-kromoszóma mikrodéláció vizsgálat (AZFa, AZFb, AZFc)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap	H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Cisztás fibrózis leggyakoribb mutáció (CFTR dF508)	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap		Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Sportgenetika csomag								
Sportgenetika	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap	H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Autoimmun vizsgálatok								
HLA-B27 genetikai vizsgálat	Teljes vér	EDTA (K2/K3) 3 ml (vérképes)	lila	4 óra	4 nap	7 nap	H-P: 9:00 - 16:00	Humán genetikai kérés önálló EDTA-s csövet igényel! Mintavétel után minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni a mintát, amennyiben délutánra esik a mintavétel, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!
	Szájnyálkahártya törlet	Deltalab Swab for DNA collection		4 óra	4 nap			Humán genetikai beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges! Mintavétel előtt 30 perccel nem szabad enni, inni, dohányozni és rágógumizni! Mintavétel után legfeljebb 4 nappal a laboratóriumba kell juttatni, hűtve kell tárolni. A vizsgálatkéréshez a beteg beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni! A vizsgálatához két Swab levétele szükséges!
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés								
BioAge – biológiai életkor meghatározása telomerhossz méréssel	Ujjbegy vérminta	FLOQSwab mintavevő	piros kupakos	4 nap			H-P: 9:00 - 16:00	A minta a nap folyamán bármikor levehető, étrendi előírás nincs. A vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a mintavevő pálcá végén található tampon ne csak felületesen, hanem teljesen át legyen áztatva vérről. Mintavétel után szobahőmérsékleten 96 óráig tárolható és szállítható, hűteni és lefagyasztani TILOS. A vizsgálatkéréshez csatolni kell a olvashatóan kitöltött és aláírásokkal ellátott páciens beleegyező nyilatkozatot. Ennek hiányában a mintákat nem tudjuk fogadni!