

VÉRMENTA GYŰJTÉSI ELJÁRÁS

1. Győződjön meg róla, hogy a páciens keze nem hideg, és szükség esetén melegítse fel langyos vízzel. Néhány embernek gyenge a véráramlása az ujjbegyből, ami nem biztos, hogy elegendő a helyes mintavételhez. Ilyen esetekben a további próbálkozások előtt a páciens végezzen vállból körülbelül tíz karkörzést.
2. Masszírozza néhány másodpercig a páciens kiválasztott ujját, majd fertőtlenítse a mellékelt törlőkendővel.
3. Várjon néhány másodpercet, amíg fertőtlenítés után az alkohol elpárolog a bőrről.
4. Helyezze a lándzsát a páciens ujjbegyére, majd a lándzsa bőrre nyomásával végezze el a szúrást.
5. Nyomja és masszírozza a páciens ujját a szúrás irányába, hogy megkönnyítse a véráramlást.
6. Távolítsa el a mintavevő pálcát a kupakból és fogja a pálcát a tampon részhez közel.
7. Óvatosan helyezze a tampont a véráramlás helyére, és hagyja, hogy a tampon felszívja a vért.
8. A tampont teljesen át kell áztatni vérrel. Miután a középső rész teljesen átázott, fordítsa a tampon oldalait a véráramlás helyére, hogy az teljesen átázzon.
9. Helyezze vissza a mintavevő pálcát a kupakba, és győződjön meg róla, hogy a mintavevő pálca biztonságosan le van zárva.

A vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a mintavevő pálca végén található tampon ne csak felületesen, hanem teljesen át legyen áztatva vérrel.

**NEM MEGFELELŐ
VÉRMENTA**



**MEGFELELŐ
VÉRMENTA**

CLINOMICS EUROPE KFT.

1094 Budapest, Mihálkovics utca 10. – Tel.: +36 30 698 7212

E-mail: lab@climonicseurope.com Web: www.clinomicsdiag.hu