

CLINOMICS EUROPE MINTAVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ COLONAIQ LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOKHOZ

1 A PÁCIENS ELŐKÉSZÍTÉSE

1.1 Előkészület vérmintavételhez

A minta a nap folyamán bármikor levehető, étrendi előírás nincs. Javasoljuk azonban, hogy a vérvétel előtti napon, majd a vérvétel napján is a páciensek figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre.

A vizsgálat előtti hétben a páciens nem kaphat vérátömlesztést. Várandósság ideje alatt, illetve az azt követő két hónapban nem végezhető el a vizsgálat.

1.2 Mintavételi tájékoztatás

Mintavétel előtt a páciens, ill. gyermekek esetében a szülőket tájékoztatni szükséges a tervezett vizsgálatokról, a páciens (vagy szülő) erre vonatkozó lehetőségeiről az esetleges előírásokról, az adott mintavétel módjáról, illetve kockázatairól. Egyéb megállapodás hiányában ez a beküldő partnerünk feladata.

2 DOKUMENTÁCIÓ ÉS MINTAVÉTELI ESZKÖZÖK ELŐKÉSZÍTÉSE

2.1 Beteg- és mintaazonosítás, dokumentációkészítés

A páciens okmányokban (TAJ kártya, személyi igazolvány) található adatok alapján azonosítsa a vérvételre jelentkező beteget.

- A vérvételi csöveken olvashatóan kötelező feltüntetni a szükséges betegazonosítókat** (név + Taj-szám, vagy név + születési dátum). Ezek hiányában nem tudjuk a mintákat fogadni.
- A vizsgálatkéréshez a **DS-HU49 kódszámú vizsgálatkérő lap és beleegyező nyilatkozatot olvashatóan és megfelelően kitöltve, valamint aláírásokkal ellátva szükséges a mintához csatolni.** Ennek hiányában nem tudjuk a mintákat fogadni.

3 VÉRMINTAVÉTELI ESZKÖZÖK ÉS MINTAVÉTEL

3.1 Vérmintavételi csövek

A vizsgálatokhoz vénás vérvételből származó vérmintákat fogadunk, egyszerhasználatos zárt vérvételi rendszerekben szabványosított mintavételi csövekben az alábbiak szerint:

VÉRVÉTELI CSŐ (ADALÉK)	SZÍNKÓD	MENNYISÉG
CWBio cső (alvadásgátló + szabad DNS stabilizáló adalék)	Sárga kupakos	Minimum 8 mL
Streack cső* (alvadásgátló + szabad DNS stabilizáló adalék)	Barna kupakos	Minimum 8 mL
EDTA cső (alvadásgátló adalék)	Lila kupakos	Minimum 8 mL

A vérvételi csöveket szobahőmérsékleten (15-25°C) tárolja.

Ideálisan 10 mL, de nem kevesebb, mint 8 mL vénás vér levétele szükséges.

*Alternatív szabad DNS stabilizáló csővel helyettesíthető, további információért forduljon munkatársainkhoz.

3.2 Helyes mintavétel

Ajánlás: Amennyiben a *vérvételi sorrendben* a heparint tartalmazó csövet közvetlenül követi a szabad DNS stabilizáló cső vagy *szárnyas (pillangó) mintavevő tűt* használ, javasoljuk egy adalékanyag nélküli cső vagy egy EDTA-cső levételét köztes (ún. „waste”) csőként a szabad DNS stabilizáló csőbe történő mintavétel előtt az adalékanyag-átvitel elkerülése, illetve a levegő kiküszöbölése érdekében.

- i. Kérjük, hogy a saját védelmében és a minta kontaminációjának elkerülése érdekében a mintavétel alatt és a mintavételi csövek kezelése során használjon egyszerhasználatos gumi- vagy nitril vizsgálókesztyűt!
- ii. Vérvétel közben lassan engedje megtöltődni a csövet, a cső falán lefolyva; ezzel elkerülve a vér gyors kifolyását a cső aljára.
- iii. A vérvételi csöveket teljesen (vagy jelig) meg kell tölteni! Amíg a vákuum vért szív a csőbe, NEM SZABAD a vérvételi csövet lehúzni a vérvételi haragról!
- iv. Az adalékanyagot tartalmazó csöveket RÖGTÖN a vérvétel után 8-10x a hossz tengely mentén óvatosan szükséges teljesen* megforgatni (rázni tilos!), a kellő keveredés biztosítása céljából. (*A levegőbuborék a cső egyik végéből haladjon át a másik végébe.)
- v. Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a mintavétel során az edény kívülről ne szennyeződjön.

3.3 Nem megfelelő vérminta

Nem megengedett, ha nem a megfelelő mintavételi csőben érkezik a minta, vagy a mintavételi mennyiség kevesebb, mint 8 mL.

4 MINTATÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A mintákat csak zárt műanyag dobozban, megfelelő hőmérsékleti körülmények között lehet szállítani:

- i. CWBio és Streck vérminta 15-25°C-on 96 óráig tárolható és szállítható, hűteni és lefagyasztani tilos.
- ii. EDTA-s vérminta szállításig 15-25°C-on legfeljebb 6 óráig, 2-8°C-on 24 óráig tárolható és szállítható, lefagyasztani tilos.

A vérmintákat erős rázkódástól, erős fénytől is védeni kell.

5 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- i. Vizsgálati mintát a megfelelően és hiánytalanul kitöltött dokumentációval (vizsgálatkérő lappal és beteg beleegyezővel) együtt tudjuk befogadni.
- ii. Amennyiben az elsődleges vizsgálati minta nem alkalmas a diagnosztikai vizsgálat elvégzésére, akkor a laboratórium haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a beküldővel.
- iii. A lelet kiadásának határidejét a mindenkorí árlista tartalmazza.

TOVÁBBI KÉRDÉS VAGY KÉRÉS ESETÉN MUNKATÁRSAINK ELÉRHETŐK
MUNKANAPOKON 9-17 ÓRA KÖZÖTT A +36 30 698 7212 TELEFONSZÁMON VAGY A
LAB@CLINOMICSEUROPE.COM EMAIL CÍMEN.

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIZSGÁLATAI ELVÉGZÉSÉRE
A CLINOMICS EUROPE LABORATÓRIUMÁT VÁLASZTOTTA!